




BIORAD®

PROTECTIVE

Yıkama
Dezenfeksiyon

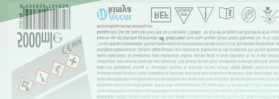

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE bidon	20x1 L
5 litre PE bidon	4x5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Tıbbi parafin, Benzalkonyum klorür, Mono Etilen Glikol ve Antikorozif maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

PROTECTIVE tüm medikal ve dental alanda kullanılan aletlerin koruyucu ve bakımının yanı sıra dezenfeksiyonunu da sağlayan yağlayıcı solüsyondür. İçerdiği medikal saflıktaki beyaz yağlar sayesinde aletlerin aşınmaya engel olan ve mafsalların rahat bir şekilde çalışmasını mümkün kılar. Bu yağ filmi ile etkin bir şekilde kaplayarak hava ve nemle temasını engeller.

KULLANIM ALANLARI

Metaller, plastikler, kauçuk, lastik, cam, tahta, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Solüsyon kullanıma hazırdır. Yıkayıcı dezenfektörlere veya daldırma küvetlerine kullanıma hazır Biorad®Protective emülsiyonu yeterince boşaltılır. Korunması yapılacak aletlerin tamamı emülsiyonun içinde kalacak şekilde daldırılır. Tıbbi, cerrahi ve dental aletleri yıkayıcı dezenfektörlerde veya daldırma küvetlerinde aldıktan sonra durulanmadan kurumaya bırakılır. Aletler gerektiğinde bu işlemlerden sonra direkt olarak sterilizasyona gönderilebilir. İşlem görmüş aletler tekrar kullanılmak istenildiğinde herhangi bir dezenfektan solüsyonu ile dezenfekte edilmesi yeterlidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.