



BIORAD®

STRONG A PLUS

Yıkama
Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE bidon	20x1 L
5 litre PE bidon	4x5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Fosforik asit, Benzalkonyumklorür, Antikorozif maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Strong A PLUS konsantre pas ve korozyon giderici yıkayıcı solüsyondür. Konsantredir. Aletler üzerindeki protein kalıntıları, demir oksit ve diğer oksidasyon lekelerinin giderilmesini sağlar.Malzeme uyumluluğu yüksektir.Manuel ve ultrasonik yıkama cihazlarında kullanılır. Sterilizasyon buharından dolayı oluşan lekelenmeyi engeller.

KULLANIM ALANLARI VE AMACI :

Strong A PLUS pas ve korozyon giderici, tıbbi aletler üzerindeki leke, korozyon ve pası giderir. Cerrahi, anestezi, laboratuvar malzemeleri, diş hekimliği gibi bir çok alanda kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

BIORAD STRONG A PLUS Pas ve korozyon giderici; temizlenecek yüzeyin pas durumuna göre %1-%10 (örn;%1 konsantrasyonda 1 litre suya 10 ml solüsyon) aralığı oranında her türlü kalitedeki su ile seyreltilerek kullanılır. Uygun oranda seyreltilen ürün bir kaba doldurulur , paslı aletler tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde kaba daldırılır,minimum 5 maksimum 10 dakika bekledikten sonra aletler solüsyondan çıkarılır ve bol su ile durulanır.Ultrasonik cihazlardaki etki süresi 5 dakikadır. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24 saattir,kirlilik artışı halinde daha erken değiştiriniz.