



BIORAD®

CLEAN SPRAY

Yer Yüzey Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Didecyldimethylammoniumchloride , Propan-2-ol, Ethanol, Korozyon inhibitörü ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Medikal ve tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı dezenfeksiyon için kullanılan alkol bazlı antikorozyf , hoş kokulu bir üründür. Tıbbi cihaz yönetmeliğine tabi alkole dayanıklı ve ıslanmasında sakınca bulunmayan tüm tıbbi cihaz, manuel alet, ekipman ve yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonunda yardımcı olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI:

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin özellikle PVC/epoksi alanların, yerlerin,duvarların, ultrason propları, küvözler, dental alanda kullanılan aletler ve mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde dezenfeksiyon zorunlu tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini aynı zamanda dezenfeksiyonunu, ameliyathanelerin, yoğun bakım odaları,hasta yatağı kenarları, serum askısı, mikroskopların el ve cilt teması olduğu alanlarda, hasta cildi ile temas eden aletlerin temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Clean Spray, tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanıma uygun, hazır püskürtme dezenfektanıdır. 30 cm - 40 cm mesafeden püskürtülür. Etki göstermesi için 30 sn beklenir.Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid , Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tuberkülosid, Sporisid

www.famed.com.tr