



BIORAD®

CLEAN FLASH OPA

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

%0,55 Ortho-phthalaldehyde, Korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Clean Flash OPA kullanıma hazır 5 dakikada dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapar, etkinliğini yitirmeden 14 gün kullanım özelliği vardır. Korozyon inhibitörü içerir. Test stripleri ile kolayca kontrol edilebilir. Tıbbi aletlerin, endoskopların dezenfeksiyonu için kullanılan, fenol, klor ve formaldehit içermeyen, renksiz, kokusuz, toksik olmayan kullanıma hazır yüksek düzey alet ve endoskop dezenfektanıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Clean Flash Opa Solüsyonu, her türlü cerrahi aletin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karlstorz, Olympus, Pentax ve Fujinon gibi tüm endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin ve laparaskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Clean Flash Opa solüsyonu kauçuk, plastik, Pvc, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi alet ve cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur. Solüsyonu dezenfektan küvetine doldurunuz. Enzimatik solüsyon ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz, küvetin ağzını kapatınız. Ağız kapatılan küvet etki süresi kadar bekletildikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Gözle görülür bir kirlilik olduğunda solüsyonun değiştirilmesi tavsiye edilir. Etkinliğini kaybetmiş her 5L solüsyon için 25-32 gr glisin karıştırarak, yönetmeliklere uygun bertaraf edilir. Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüsid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

www.famed.com.tr