



BIORAD®

NCM+AMINOS

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Didesildimetilamonyumklorür, Benzalkonyumklorür, korozyon ve köpük inhibitörleri ve yardımcı malzemeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

NCM+AMINOS Tıbbi aletleri dezenfekte etmek için kombine edilmiş etkinliğini kuarterner amonyum bileşiklerinden alan, aldehit ve fenol içermeyen konsantre solüsyondur. Tüm materyallerle uyumluluk gösterir ve tüm bakteri, mantar, virüs türlerine karşı etkilidir.

KULLANIM ALANLARI:

NCM+AMINOS her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopik aletler, flexible ve rijid endoskopların temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlar. Cam, seramik, silikon, plastik, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Tıbbi alet dezenfeksiyonlarında %1 dozda seyreltilerek kullanılır. (Örnek; 10 lt solüsyon hazırlamak için 9,9 lt suya 100ml solüsyon ekleyiniz.) Etki süresi 5 dakikadır. En fazla 15 gün etkinlik süresine sahiptir. Solüsyonda organik atık oluşumu veya gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Tüberkülosid, Mikobakterisid.