

ENDOSKOPI YIKAMA VE DEZENFEKTÖR CİHAZI

Temizleme Ve Dezenfeksiyon İçin Yeni Teknoloji



*Otomatik Endoskop Yıkama ve
Dezenfektan Cihazı
Medikal Tetkiklerden Güven
Garantisi Almıştır.*

Choyang CYW-501 Endoskop yıkama ve dezenfektör üçlü koruma için tüm özelliklerini sizlere sunar; hastalarınızı , personelinizi, ve endoskopi cihazlarınızı korur.

Choyang CYW-501 tam otomatik çiftli skop yüksek-düzye dezenfeksiyon protokolünde yüksek standartları yakalamıştır. Su rezistansı ve hava basıncını kontrol ederek CYW-501 endoskoplarınız için hem içeriden hem dışarıdan mükemmel yıkama ve dezenfeksiyonu garanti eder.

Operasyon kullanıcının isteğine bağlı olarak otomatik ya da manuel olabilir. CYW-501 hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak için donatılmıştır.

360 Derecelik kavisle
Çoklu-Kanal jet sistemi



Otomatik Su Hattı
Sterilizasyon Çemberi



Su tankı içerisinde UV
lambalı dezenfeksiyon
sistemi



Tamamlayıcı Özellikler

Kaçak Test Cihazı / Operasyon Prosedürü

Zaman	Su	10-50 sn. ,1-5:00 dk.
	Dezenfeksiyon	1-10 dk, 20-50 dk, 1-9 Saat
	Enzimatik	10-30 sn.
	Alkol	5 sn.
Program Modu (Otomatik)	A modu: Yıkama - deterjan - yıkama - dezenfeksiyon yıkama-alkol-hava	
	B Modu : Yıkama - deterjan-yıkama-alkol-hava	
	C Modu: Yıkama -Dezenfeksiyon-yıkama-alkol-hava	
	D Modu: A modu ile aynı (dezenfeksiyon 1 turdan sonra tahliye)	
Tank Kapasitesi	Su	20 lt
	Dezenfeksiyon	20 lt
	Deterjan	1,5 lt.
	Alkol	1,5 lt.
Kanallar	6 adet temizleme kısmında mevcut. (2 skop için)	
Tahliye	1 çıkış (arka panelde zorunlu.)	
	3 çıkış (ön kapakta)	
Güç	220 V.60 Hz.	
Ölçüler	64x62 x 105 cm (G x Dx Y)	
Güç	86 kg.	

BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLER

- Eş zamanlı çift skop yıkama ve dezenfeksiyon
- Kaçak testi (hava ve su ile)
- 3 adet güçlü motor tarafından sağlanan mükemmel yıkama ve dezenfektan
- 360 derecelik kavisle çoklu - kanal jet sistemi
- Gelişmiş su filtrasyon sistemi
- 2 Adet U.V. Lambalı su dezenfeksiyon sistemi
- Dezenfeksiyon sonrası bilgi fişi çıkışı (Printer Sistem)
- Kendi kendini dezenfeksiyon sistemi
- Alkol ile emizleme sistemi
- Ultra Viole sistem kontrolü

FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR İTH.İHRC. ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Cevizli Mah. Hacılar Cad.
No:44/A Kartal / İstanbul



+90 216 597 0 567
+90 216 441 29 99



+90 216 397 15 15

www.famed.com.tr